

OvaCyte™ Pet

Nul besvær, AI-baseret fæcesanalyse.

OvaCyte™ Pet systemet er udviklet i samarbejde med University College Dublin og ICHEC (Irish Center for High-End Computing). Dette instrument er en prisvenlig point-of-care løsning, som hurtigt bliver et værdifuldt redskab i klinikens in-house lab.

Nul besvær - lukket opsamlingsystem

OvaCyte Pet's brugervenlige opsamlingsystem betyder, at prøven er klar til at køre på analyseapparatet på under 2 minutter. Der er ingen vejning, maceration eller separat manuel centrifugering involveret.

Bringer laboratorie-kvalitet ind i klinikken

OvaCyte Pet's nye fuldautomatiske analyseinstrument kombineret med AI-drevet digital analyse giver nøjagtige og pålidelige resultater.

Hurtigt, korrekt og informeret valg

OvaCyte Pet leverer hurtige, brugbare resultater indenfor samme tid som en konsultation tager. Ovacyte Pet hjælper jer med at træffe præcise beslutninger hurtigt og undgå unødvendige behandlinger.



Brugbare resultater efter laboriestandard. På klinikken. I realtid.



HOOKWORM • ROUNDWORM • WHIPWORM • COCCIDIA


Produkterne er ikke beregnet til diagnosticering, forebyggelse eller behandling af en sygdom.



VetPlus®


A Global Leader in Veterinary Nutraceuticals

OvaCyte Pet - enkelt, hurtigt og præcist!

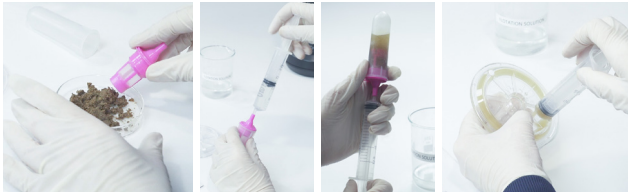

A. Klargøring af prøve

Vores OvaPrep-testrør gør forberedelsen ekstremt nem, ren og hurtig - og er gjort på mindre end 2 minutter. Brug testrøret til at udtage fæcesprøven uden at veje den. Tilsæt flotationsvæske, og fjern den med en sprøjte. Opsug fæcesprøven fra OvaPrep-testrøret. Derefter fyldes prøven på test kassetten.

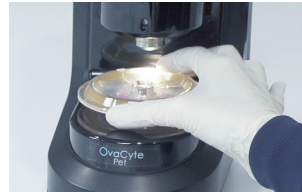

B. Sæt den i og kør!

Sæt kassetten i OvaCyte Fecal Analyzer, og start scanningen. Både scanning, analyse og rapporten er fuldt automatiseret. Denne AI-drevne billedgenkendelsessoftware identificerer og antallet af parasitæg eller oocyster der er til stede.



C. Få resultater og rapporter

I løbet af 12-14 min. er resultaterne og alle scanningsbilleder tilgængelige på OvaCyte-webapplikationen på dine computer eller smartphone.

OvaCyte Pet

- Kontrollerer afføringsprøver for rundorm, hageorm, piskeorm og occidier
- Klargøring af test <2 minutter
- Scanningstid 12-14 minutter
- AI-baseret genkendelsessoftware
- Nul besvær - lukket opsamlingsystem giver enkel og lugtfri håndtering for ejer og personale
- Priser fra 99 kr. pr. test

Produktinformation

Produkt	Kort beskrivelse/indhold	Cat. No. (Antal tests)
OvaCyte Pet Fecal Analyzer	Kompakt enhed med integreret touch skærm, inklusiv strømkabler, strømadapter, låse møtrik og Ethernet-kabel	FP20001
OvaCyte Pet Test Kit	40 x OvaCyte Pet kassetter, 40 x OvaPrep, og 1 L af OvaCyte Pet Flotation Fluid	FP24001 (40)

Læs mere på: www.lifetest.dk

Hvidovrevej 80E, 2610 Rødovre

Email: info@lifetest.dk | Tlf: +45 23 90 90 81

Opret forbindelse til os på LinkedIn: <https://dk.linkedin.com/company/lifetest>

Produkter er ikke beregnet til diagnosticering, forebyggelse eller behandling af en sygdom.

